

# SANTÉ DE BÉBÉ

Un indicateur pratique pour contrôler la fièvre

Avantage produit


## ThermoTest®

Idéal en voyage, dans la trousse de bébé ou la trousse de secours de la famille

### THERMOMETRE FRONTAL

- Contrôle rapidement et facilement la température
- Affichage à cristaux liquides : indique le niveau de température en 15 secondes

THERMOTEST est destiné à être utilisé uniquement sur le front. Si la fièvre est indiquée (température > 38°C), il faut confirmer la lecture avec un thermomètre standard.

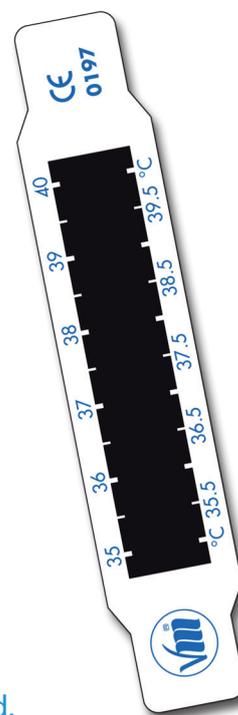


Réf :	Gencod	PCB
VM-TS1	3760165441991	24



- Pour une bonne lecture le front doit être sec.
- Attendre 30 minutes après avoir mangé, bu ou fait de l'exercice avant de prendre la température.
- Vert : Indique la bonne Température.
- Brun : Déduire 0.3°C du nombre indiqué pour avoir la bonne température.
- Bleu : Ajouter 0.3°C au nombre indiqué pour avoir la bonne température.
- Garantie 6 mois.

# ThermoTest®

## Comment ça marche ?

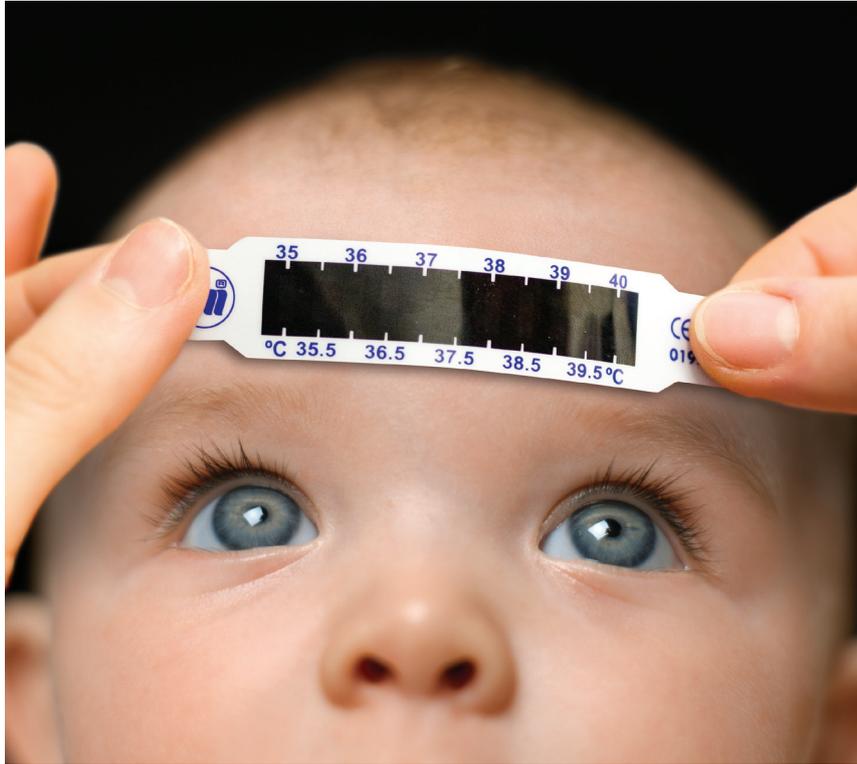

- Tenez le thermomètre frontal fermement par les deux extrémités et appuyez-le au centre du front, la partie sèche juste au-dessus des sourcils. Maintenez-le en place jusqu'à ce que les couleurs arrêtent de changer (environ 15 secondes).
- Lisez la température en maintenant le thermomètre contre le front.
- Le vert indique la bonne température ; si le vert n'apparaît pas, soustrayez 0.3°C/0.5°F de la couleur allumée la plus haute pour obtenir la bonne température.